

**1** Lesen Sie sich die **Gebrauchsanweisung** bitte **gründlich** durch. Legen Sie sich eine Stoppuhr oder einen Zeitmesser griffbereit (einziges nicht mitgeliefertes Material).

**2** Hände mit Seife und warmem Wasser waschen und anschließend abtrocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.



Nehmen Sie alle Komponenten aus der Box und legen Sie sie auf eine flache und saubere Oberfläche. Identifizieren Sie dann jede einzelne Komponente des Sets (siehe Inhalt auf der linken Seite, 7 verschiedene Komponenten).

Öffnen Sie den Beutel **A** und ziehen Sie die Kassette **B** heraus. Den Test innerhalb von 1 Stunde verwenden.

Ziehen Sie das Desinfektionstuch **E** aus seinem Beutel und desinfizieren Sie die für die Blutentnahme ausgewählte Fingerspitze.



Nehmen Sie das sterile Pad **F** aus seinem Sacht. Reste des Desinfektionsmittels entfernen.

Kappe der Lanzette **G** abnehmen.


Lanzette **G** an die Fingerspitze ansetzen. Lanzette durch Druck auf das andere Ende auslösen.

9



**Druck auf die Fingerspitze ausüben**, um einen **großen Blutstropfen** für die Probenahme zu erhalten.

10

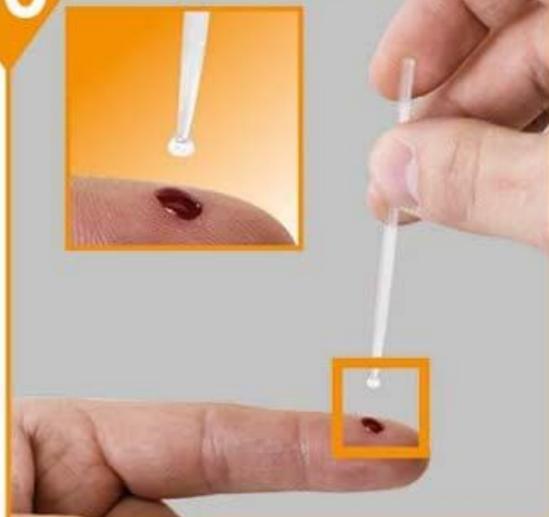

Die Ausbuchtung am verbreiterten Teil der Pipette **D** an den Blutstropfen ansetzen, um diese vollständig zu füllen.

11



Den Blutstropfen sofort in die quadratische Probenvertiefung BLOOD der Kassette **B** geben (der Blutstropfen muss in direktem Kontakt mit dem Boden der Probenvertiefung sein).

12



Überprüfen Sie, dass der Boden der Probenvertiefung BLOOD vollständig rot ist, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen (dies bestätigt, dass der Blutstropfen ordnungsgemäß hinzugefügt wurde).

13



Kappe der Tropfflasche **C** abschrauben. Zwei Tropfen in die runde Probenvertiefung DILUENT der Kassette **B** geben.

14



Zeitmesser starten oder Zeitpunkt notieren, an dem die Tropfen in die Probenvertiefung gegeben wurden. 10 Minuten warten, dann Ergebnis ablesen. Nach 20 Minuten nicht mehr ablesen. Während dieser Zeit können Sie das Pflaster **H** aufkleben.